

歩行車 ストリームオービー メンテナンスチェックリスト

※このチェックリストは福祉用具メンテナンス専門スタッフ向けです。

① 付属品の確認

点検箇所	点検項目	チェック欄	部品画像	交換部品	
				部品コード	部品名
① 取扱説明書	(1) いつでも見られるように保管している				
② バッグ	(1) バッグのほつれ、汚れ、破れがない			OBP-32	バッグ
	(2)マジックテープのほつれ、ゴミが付着していない				
	(3) バッグ取付金具がバッグにしっかりと固定されている				
③ 各種シール	(1) 左右のブレーキ調節表示シールが貼られている			OBP-40	ブレーキ調節表示シール
	(2) ステレオタイプステッカーが左右のフレームにしっかりと貼られている			OBP-39	ステレオタイプステッカー
④ 杖用ホルダー	(1) ネジでしっかりとフレームに固定ができる			OBP-33	杖用ホルダー
⑤ 杖用ストラップ	(1) マジックテープのほつれ、ゴミが付着していない			OBP-34	杖用ストラップ

② 外観の確認

点検箇所	点検項目	チェック欄	部品画像	交換部品	
				部品コード	部品名
① フレームの点検	(1) フレームの塗装に傷やはがれがない			OBP-41	スプレー
	(2) 本体フレームにひび割れ、変形がない			×	廃棄
	(3) 本体フレームにゆがみ、がたつきがない			×	廃棄
② 溶接部の点検	(1) 本体フレーム溶接部にがたつきや外れがない			×	廃棄
	(2) クロスバー溶接部にがたつきや外れがない			×	廃棄
	(3) ハンドルポスト溶接部にがたつきや外れがない			OBP-2 R/L	ハンドルポスト (左右)

歩行車 ストリームオービー メンテナンスチェックリスト

点検箇所	点検項目	チェック欄	部品画像	交換部品	
				部品コード	部品名
③ ネジ部の点検	(1) ブレーキレバー取付金具が左右6カ所とも緩みなく締まっている				
	(2) シート部留めネジが8箇所とも緩みなく締まっている			OBP-28	シート部留めネジ
	(3) ブレーキ金具固定ボルトが左右2カ所とも緩みなく締まっている				
	(4) 背もたれ固定ボルト・ナットが左右2カ所とも緩みなく締まっている			OBP-31	背もたれ固定ボルト・ナット
	(5) ブレーキレバー固定ネジが左右2カ所とも緩みなく締まっている			OBP-5	ブレーキレバー固定ネジ
	(6) ブレーキ部固定ネジ・ソケットネジが左右2カ所とも緩みなく締まっている			OBP-18	ブレーキ部固定ネジ・ソケットネジ
④ 樹脂部の点検	(1) 左右のハンドルグリップに傷、剥離、ひび割れがない 左右のハンドルグリップはしっかりとハンドルポストに奥まではめ込まれている			OBP-1	ハンドルグリップ
	(2) シート固定折りたたみロックは変形、傷、割れがない			OBP-35	シート固定折りたたみロック
	(3) シート固定折りたたみはスムーズに可動する				
	(4) ハンドル部キャップの変形、割れがない			OBP-3	ハンドル部キャップ
	(5) 左右のハンドル部キャップは奥までしっかりととはめ込まれている				
	(6) 左右のフレームキャップに傷、割れがない フレームキャップは変形がなく、フレームにしっかりととはめ込まれている			OBP-7	フレームキャップ
	(7) フロントフレームキャップはフレームにしっかりととはめ込まれ、固定されている			OBP-10	フロントフレームキャップ
	(8) 左右のS字ガイドリングにブレーキワイヤーが通っている			OBP-11	S字ガイドリング
	(9) 左右の後輪部キャップはしっかりととはめ込まれ、固定されている			OBP-21	後輪部キャップ
	(10) 左右のシート前部キャップは変形がなく、しっかりととはめ込まれている			OBP-29	シート前部キャップ
	(11) 左右のシート後部キャップは変形がなく、しっかりととはめ込まれている			OBP-36	シート後部キャップ

歩行車 ストリームオービー メンテナンスチェックリスト

③機能の確認

点検箇所	点検項目	チェック欄	部品画像	交換部品	
				部品コード	部品名
① 車輪の点検	(1) 左右の前輪に摩耗、割れ、損傷がない			OBP-22	前輪
	(2) 左右の前輪(フォーク)が360° スムースに回転する				
	(3) 左右の前輪フォーク固定部にがたつきや歪みがない				
	(4) 左右の前輪フォークに傷や損傷、割れがない			OBP-37	前輪フォーク
	(5) 左右の後輪に摩耗、割れ、損傷がない			OBP-23	後輪
	(6) 左右の後輪はスムーズに回転する				
	(7) 左右の後輪車軸に緩みがなく、しっかりと固定されている				
	(8) 前輪ベアリング(左右計4カ所)、後輪ベアリング(左右計4カ所)に割れなどがなく、車輪はそれぞれブレなく回転する			OBP-24	前・後輪用ベアリング
	(9) 平らな場所で4輪すべてが同時に接地する				
	(10) 車体を押したときに、きちんと直進する				
② ブレーキ・駐車ロックの点検	(1) 左右のブレーキレバーに傷、汚れ、損傷がない			OBP-4 R/L	ブレーキレバー(右・左)
	(2) ブレーキレバーを十分握ることができる				
	(3) ブレーキの利き具合が正常である				
	(4) 駐車ブレーキロックが正常に作動する				
	(5) 左右2カ所のブレーキ部バネに錆び損傷がなく、伸びてレバーの戻りが悪くなっていない			OBP-15	ブレーキ部バネ
	(6) 左右のブレーキ部バネゴムカバーに傷、割れ、損傷がない			OBP-16	ブレーキ部バネゴムカバー
	(7) ブレーキ金具とタイヤのすき間が左右とも2mmを超えていない				
③ 高さ調節の点検	(1) 左右の高さ調節ボルトがしっかりと固定され、ハンドルのがらつきがない			OBP-8	高さ調節ボルト
④ 折りたたみ動作の点検	(1) 折りたたみがスムーズに動作する				
	(2) シート固定折りたたみロックに破損、変形がない			OBP-35	シート固定折りたたみロック